

ISTRUZIONI PER L'USO



- A. Lavare accuratamente le mani. Aprire la confezione dalla parte opposta rispetto alla setola del tampone ed estrarlo dalla confezione. **N.B. Non gettate la confezione del tampone!!!**



- B. Utilizzare il tampone come fosse uno "spazzolino da denti" sfregandolo energicamente sulle gengive e sulla superficie interna delle guance. Effettuare il prelievo con tutti i tamponi forniti



- C. Reinscrivere il tampone all'interno della confezione che lo conteneva precedentemente, e porre il tutto nella busta fornita.

D. Allegare ai campioni:

Compilare in tutte le sue parti la Scheda "Pre-Acettazione" in allegato

Indicare la specifica degli esami da effettuare (test per intolleranza al lattosio, test per la celiachia)

Solo per la prima spedizione indicare a parte i dati per la fatturazione se diversi dall'intestatario della scheda e le modalità di spedizione del referto : posta, e.mail, fax

Indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Spedire al nostro Centro : **BGT ITALIA VIALE ITALIA 48/D 07100 SASSARI**
tel. 079 516243/516025 fax 079 517149

ESAMI DI LABORATORIO
PRE – ACCETTAZIONE

ESAME		
DATA		
NOME		
COGNOME		
DATA DI NASCITA		
COMUNE DI NASCITA		
RESIDENZA (Via N°– Città)		
COFICE FISCALE		
INDIRIZZO MAIL		
TELEFONO		